

Všechny vzorky uchovávat v teplotě 4-8°C. Pokud možno, uchovávejte zkumavky se vzorkem v kolmé poloze.

Stanovení	Materiál	Zkumavka		Poznámka
ALAT	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	Nemrazit vzorky (snižuje se stabilita ALAT)
	Plazma	Zelená	Zelená	
Albumin	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
ALP	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	Nemrazit vzorky (snižuje se stabilita ALP)
	Plazma	Zelená	Zelená	
Amyláza	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
	Moč	Obyčejná plastová		
ASAT	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
	Moč	Obyčejná plastová		
Bilirubin	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	Vzorky chránit před světlem umělým i denním
	Plazma	Zelená	Zelená	
Celkový protein	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
Cholesterol	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
Fosfor	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
	Moč	Obyčejná plastová		
GGT	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
Glukóza	Plazma	Šedivá		
Hořčík	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
	Moč	Obyčejná plastová		
Kreatinin	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
	Moč	Obyčejná plastová		
Kreatin kináza	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
Kyselina močová	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
	Moč	Obyčejná plastová		
LDH	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
Močové proteiny	Moč	Obyčejná plastová		
Močovina	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
	Moč	Obyčejná plastová		
Triglyceridy	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
Vápník	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Moč	Obyčejná plastová		
Železo	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
Cholinesteráza	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená	Zelená	
Žlučové kyseliny	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
Sodík, Draslík, Chlor	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	
	Plazma	Zelená		
	Moč	Obyčejná plastová		
Hemoanalýza	Krev	Fialová		
PCR	Krev	Fialová		
ELISA	Sérum	Zlatožlutá	(Červená)	

Vysvětlivky:

Zlatožlutá	Červená
Zelená	Zelená
se separačním gelem	bez gelu

Šedivá	s fluoridem sodným-inhibice glykolýzy
Fialová	plná krev

Barevné označení odběrových zkumavek se může lišit podle výrobce a normy. Zde uvedené odpovídají např. systémy Venosafe®, Vacuette®, Vacutainer®.